

Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd Information Industrial Park, Guilin National High-Tech Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P R China Sales Dept.:+86-773-5873196 E-mail: woodpecker@glwoodpecker.com Websitehttp://www.glwoodpecker.com

Potente e inteligente Smart APP control

Control mediante App

Compatibilidad multidispositivo

Conexión Bluetooth permite un control inteligente

Grabado de historial del paciente y reportes de tratamiento en la nube

Compatible Smart Watch, Apple iPad, Apple iPhone, Android phones (Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, VIVO...)



Plan de tratamiento COMPLETAMENTE personalizable

Disponible limas de diferentes marcas

Pueden seleccionarse limas de diferentes marcas de una base de datos* para establecer un "Sistema de Limas Común"

El nombre, secuencia de limas y parámetros de trabajo del nuevo sistema de limas puede ser fijado como desees.


*... y si las limas no están en la base de datos... ¡las puedes agregar!



Guardado personalizable de tratamientos en la nube

Guardado automático de información básica del paciente, información del tratamiento y tiempo de uso de limas.

Cada profesional puede crear su cuenta personal. Ideal para dispositivos utilizados por diferentes usuarios, manteniendo independencia en sus preferencias e información.

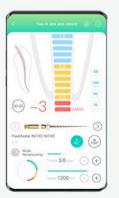








Control de voz a través de "Vivi"

Con el comando "Hola vivi", puedes: controlar el dispositivo y cambiar parámetros

- Ajustar velocidad, torque, dirección de giro, ángulo de giro, lima, etc. -

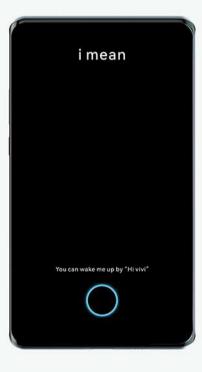

Desarrollado en conjunto Un dispositivo de alto rendimiento

- + Tu exquisíta técnica
- = Una pareja perfecta



Nuevos modo BB y modo LB

MODO BB

La lima gira continuamente a un ángulo de 90° con intervalos de 1 segundo.


BB por su nombre en inglés "block bypass" o paso de bloqueo.

Algunas restos de dentina o pulpa pueden bloquear el paso hasta el ápice.

Este modo de rotación en combinación con un movimiento arriba y abajo puede deshacer el bloqueo.

Impresionante Modo Reciprocante

Ángulo de rotación ajustable en modo reciprocante Rango de ajuste: 5° - 400° Ajustable en intervalos de 5°

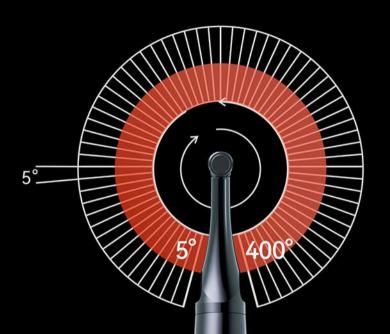

MODO LB

La lima reciprocante rota hacia adelante y hacia atrás con una diferencia angular de 5° entre ambas direcciones.

(Ej.: **Ángulo hacia adelante/Ángulo hacia atrás** 10°/5°, 15°/10°, 20°/15°, etc) Tras pasar el "Ledge" o escalón bastará con presionar el botón y empezará a rotar de forma continua.

Hay muchas razones detrás de la formación de un "ledge" o escalón, y eliminarlo es necesario para volver el canal radicular original. Primero, haz que la lima pre-doblada pase el desvío. Una vez el desvío ha sido pasado, puedes cambiar de nuevo al estado de movimiento continuo.

Compacto, fácil y cómodo de utilizar

Pieza de mano compacta

Fácil de sujetar, más cómodo

Cabeza mini 6:1 con recubrimiento aislante

Recubrimiento con polímero aislante resistente y que permite mediciones sin necesitadad de fundas aislantes.





Cómodidad en tu práctica del día a día



Cambio de color para indicar cambio de torque. Fácilmente visualizable.



Pedal inalámbrico para un fácil control.





Estable

Alto desempeño de su motor sin escobillas

10 veces la vida útil de un motor con escobillas

Corte estable asegurado incluso en la parte estrecha y curva del conducto apical.

Reduce el riesgo de separación del intrumento y mejora la eficencia en la preparación del conducto apical.




Estable

Alto desempeño de su motor sin escobillas

10 veces la vida útil de un motor con escobillas

Corte estable asegurado incluso en la parte estrecha y curva del conducto apical.

Reduce el riesgo de separación del intrumento y mejora la eficencia en la preparación del conducto apical.

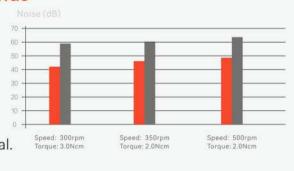



■ Brush Endo Motor











