

ENDO 3

Endoactivador ultrasónico



Versátil | Inteligente | Intuitivo



Botón anular de fácil uso

Tres niveles de potencia

Tres niveles de potencia disponibles:
E1, E2, E3, potencia de baja a alta en orden

Cuatro modos de tiempo

Cuatro modos de tiempo opcionales:
"10, 15, 20, --"

El tiempo de trabajo en el modo de riego:
"10s, 15s, 20s, 10min"

Diseño muy práctico **Riego más eficaz**

Control inteligente por microordenador

Se adopta el control automático por microordenador. La señal de oscilación de alta frecuencia es generada por el circuito de oscilación de alta frecuencia y actúa sobre el cabezal de la pieza de mano, haciendo que la punta resuene por la estimulación de vibración ultrasónica.

Mando inalámbrico de fácil manejo

Carga por contacto magnético de succión
Funcionamiento inalámbrico
Compacto y ligero, fácil de regar



Pantalla LCD clara que facilita la observación

Muestra visualmente el estado de funcionamiento de la máquina



Botón interruptor anular de fácil uso

Botón interruptor anular para controlar la máquina

Facilita el tratamiento de diferentes ángulos y diferentes posiciones de los dientes



Rendimiento estable

Amplitud de vibración adecuada

Puntas con baja vibración y alta eficiencia
Riego más eficaz y fiable




Rendimiento estable Seguimiento inteligente

Sistema de seguimiento de frecuencia totalmente automático
Búsqueda automática del mejor estado de funcionamiento



Puntas compatibles

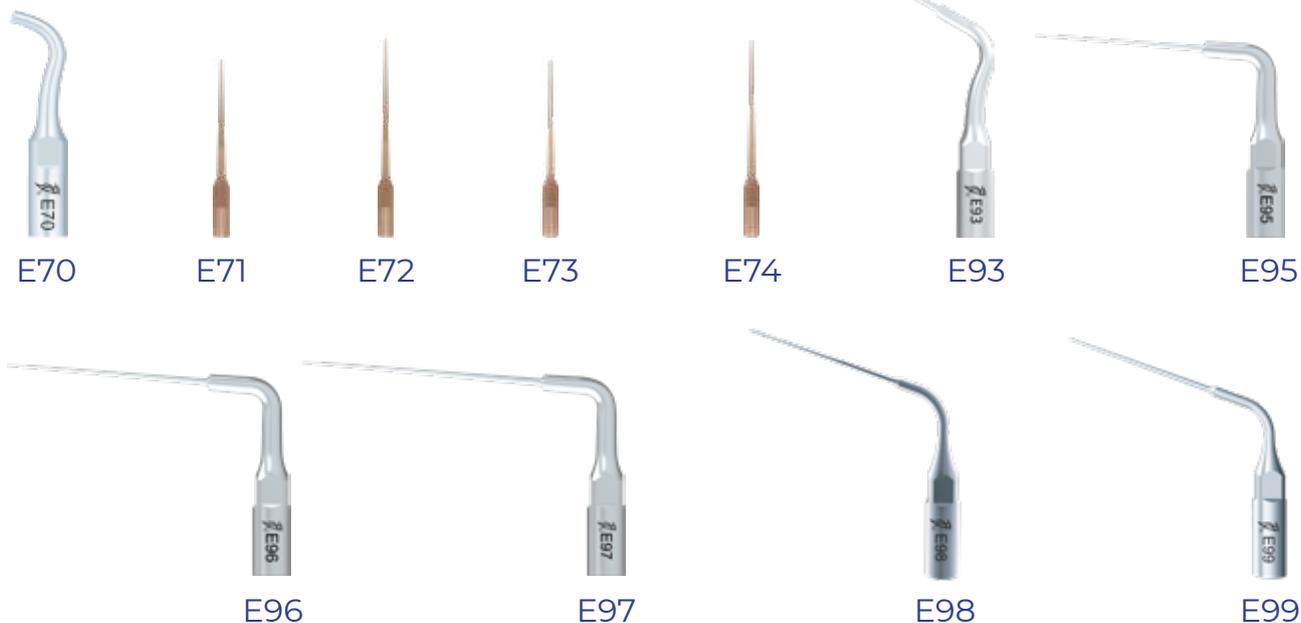

Configuración estándar: E96×2, E99×2, E70, E71×10

Configuración alta: E96×2, E99×2, E70×2, E71×10, E72×10

Puntas compatibles: E70, E71, E72, E73, E74, E93, E95, E96, E97, E98, E99

Para la irrigación del conducto después de la preparación del conducto radicular

E70: Endochuck, utilizado para instalar E71, E72, E73 o E74 para la limpieza o irrigación del conducto radicular

E71, E72, E73, E74: Material polimérico sin capacidad de corte

E93: 20#, conicidad 1%, longitud punta 21.5mm, Ni-Ti

E95: 20#, conicidad 2%, longitud del extremo de la punta 18mm, acero inoxidable

E96: 20#, conicidad 2%, longitud del extremo de la punta 21mm, acero inoxidable

E97: 20#, conicidad 2%, longitud del extremo de la punta 25mm, acero inoxidable

E98: 25#, conicidad 2%, longitud del extremo de la punta 18.5mm, aleación de titanio

E99: 25#, conicidad 2%, longitud del extremo de la punta 18.5mm, aleación de titanio



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin Guangxi, 541004 P. R. China

Importador mayorista Woodpecker / DTE
para España y Portugal

RUMAR Cedeira S.L.

C. del Obispo Golfín, 11, Bajo A, 28430 Alpedrete, Madrid

Tlfno.: 91 849 01 04

Tlfno. móvil / Whatsapp: +34 626 327 863

¡Siempre en Stock! Entrega en 24 horas.

Dispositivos, accesorios, repuestos y servicio postventa

Su distribuidor de confianza:

RUMAR
mayorista dental