



# Smart A

Endo Motor




# Potente e inteligente Smart APP control

## Control mediante App

## Compatibilidad multidispositivo

Conexión Bluetooth permite un control inteligente  
Grabado de historial del paciente y reportes de tratamiento  
en la nube

Compatible Smart Watch, Apple iPad, Apple iPhone,  
Android phones (Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, VIVO...)

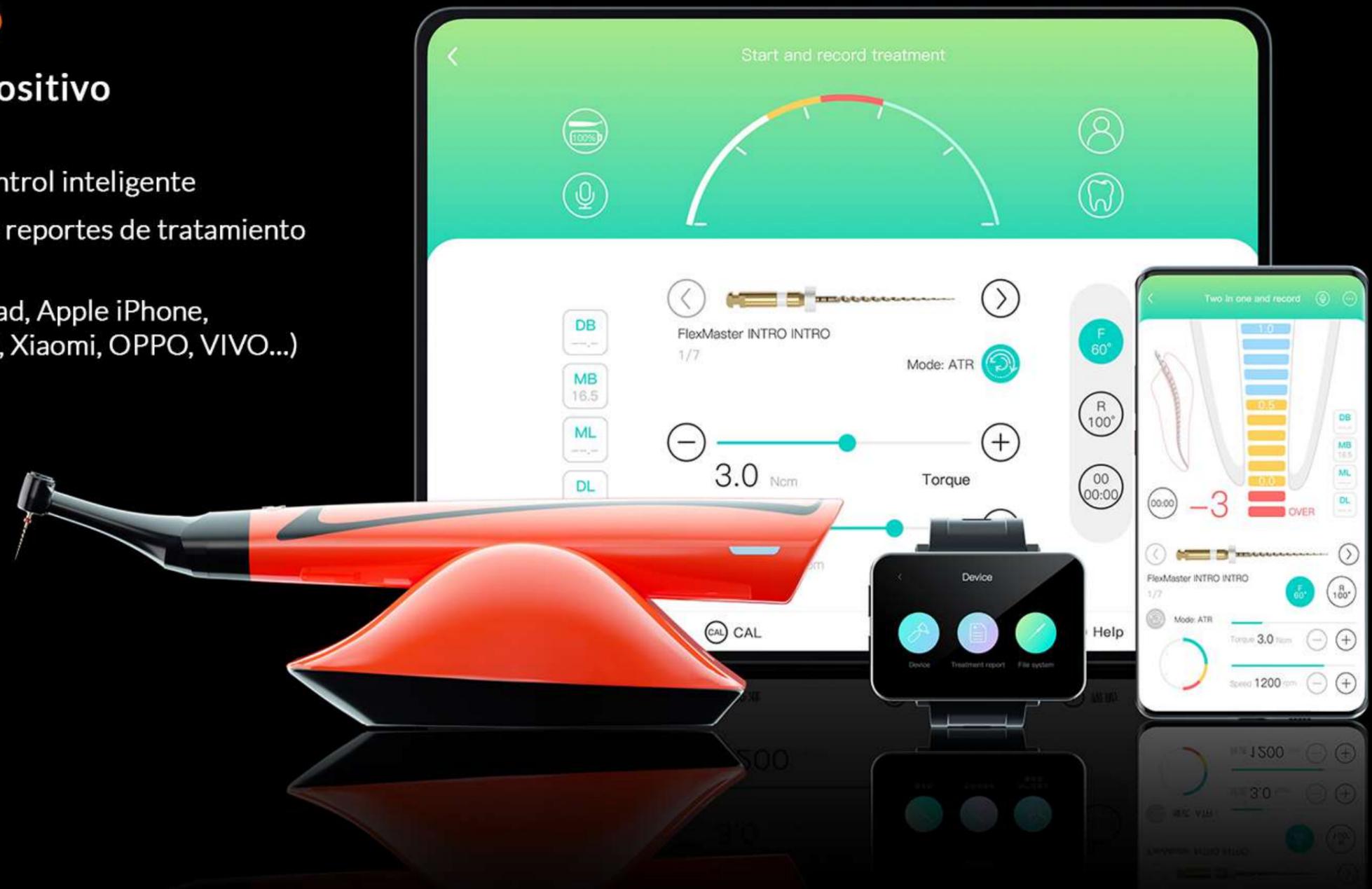


## Plan de tratamiento COMPLETAMENTE personalizable

Disponibles limas de diferentes marcas

Pueden seleccionarse limas de diferentes marcas de una base de datos\* para establecer un "Sistema de Limas Común"

El nombre, secuencia de limas y parámetros de trabajo del nuevo sistema de limas puede ser fijado como desees.

\*... y si las limas no están en la base de datos... ¡las puedes agregar!

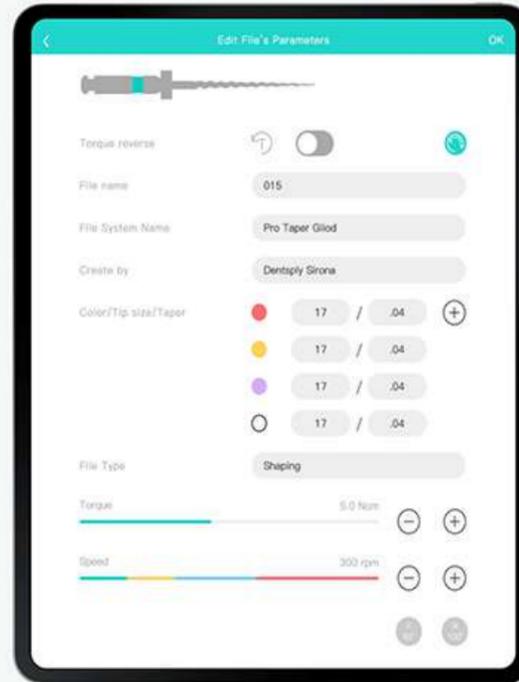

## Control de voz a través de "Vivi"

Con el comando "Hola vivi", puedes: controlar el dispositivo y cambiar parámetros


- Ajustar velocidad, torque, dirección de giro, ángulo de giro, lima, etc. -



## Guardado personalizable de tratamientos en la nube

Guardado automático de información básica del paciente, información del tratamiento y tiempo de uso de limas.

Cada profesional puede crear su cuenta personal. Ideal para dispositivos utilizados por diferentes usuarios, manteniendo independencia en sus preferencias e información.

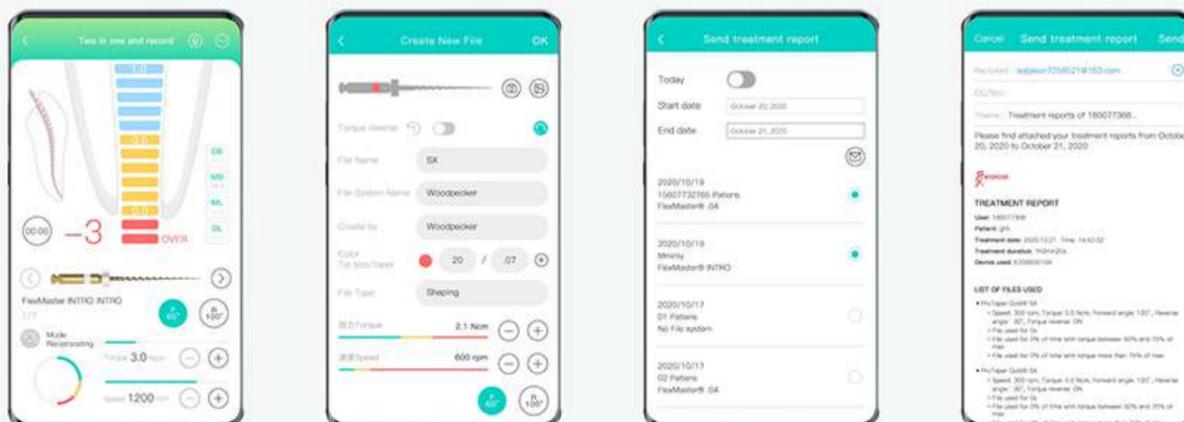

**Desarrollado en conjunto**  
**Un dispositivo de alto rendimiento**  
**+ Tu exquisita técnica**  
**= Una pareja perfecta**



### Impresionante Modo Reciprocante

Ángulo de rotación ajustable en modo reciprocante  
Rango de ajuste: 5° - 400°  
Ajustable en intervalos de 5°



### Cooperación con grandes endodoncistas:

Nuevos modo BB y modo LB

#### MODO BB

La lima gira continuamente a un ángulo de 90° con intervalos de 1 segundo.

BB por su nombre en inglés "block bypass" o paso de bloqueo.

Algunos restos de dentina o pulpa pueden bloquear el paso hasta el ápice.

Este modo de rotación en combinación con un movimiento arriba y abajo puede deshacer el bloqueo.

#### MODO LB

La lima reciprocante rota hacia adelante y hacia atrás con una diferencia angular de 5° entre ambas direcciones.

(Ej.: \*\*Ángulo hacia adelante/Ángulo hacia atrás\*\* 10°/5°, 15°/10°, 20°/15°, etc)  
Tras pasar el "Ledge" o escalón bastará con presionar el botón y empezará a rotar de forma continua.

Hay muchas razones detrás de la formación de un "ledge" o escalón, y eliminarlo es necesario para volver el canal radicular original. Primero, haz que la lima pre-doblada pase el desvío. Una vez el desvío ha sido pasado, puedes cambiar de nuevo al estado de movimiento continuo.

# Compacto, fácil y cómodo de utilizar

## Pieza de mano compacta

Fácil de sujetar, más cómodo

## Cabeza mini 6:1 con recubrimiento aislante

Recubrimiento con polímero aislante resistente y que permite mediciones sin necesidad de fundas aislantes.



17mm La cabeza más mini en combinación con su funcionamiento inalámbrico permiten una comodidad máxima.

Head diameter reduced by 12.5%


12.5%




Ordinary contra-angle Smart A

Head height reduced by 18%

18%

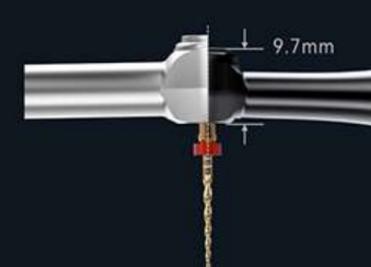

Ordinary contra-angle Smart A

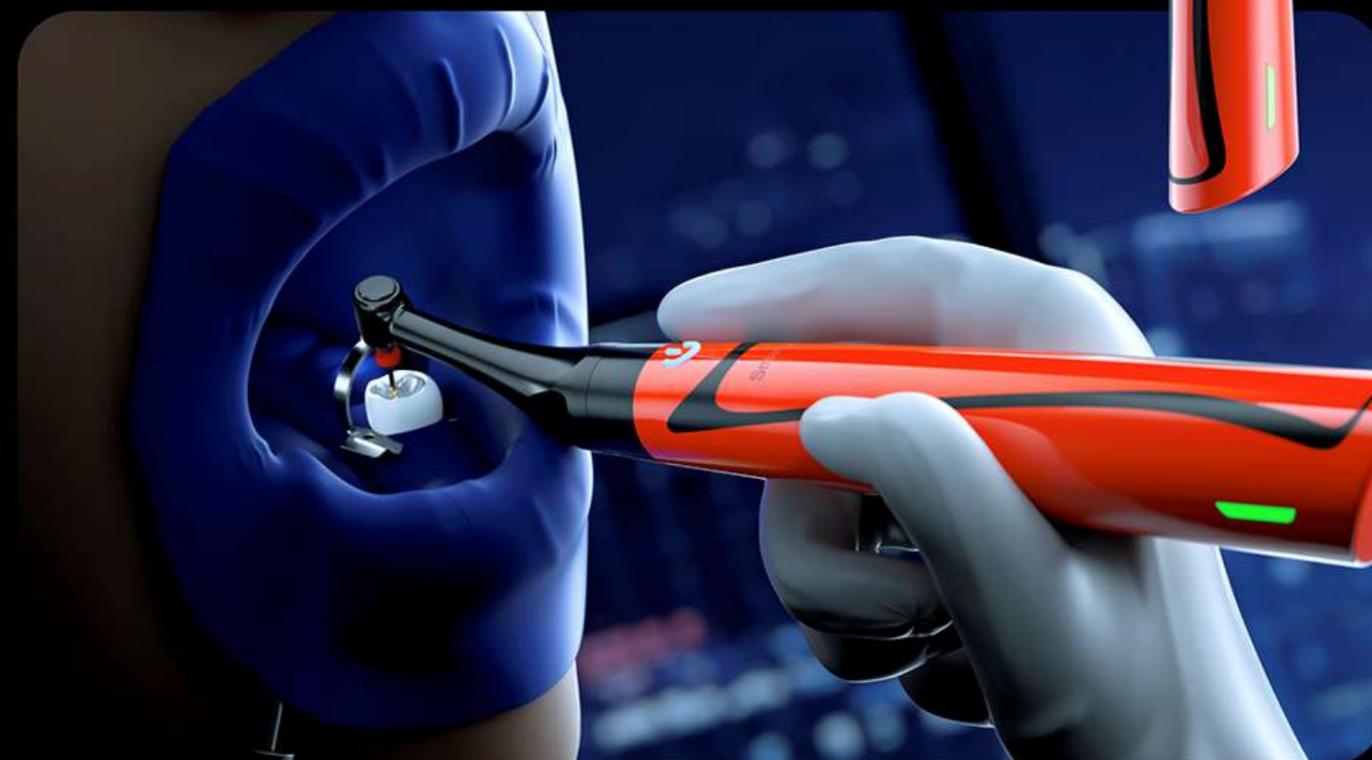

Cómodidad en tu práctica del día a día



Carga y sujeción por contacto magnético

Cambio de color para indicar cambio de torque. Fácilmente visualizable.



Pedal inalámbrico para un fácil control.




## Estable

Alto desempeño de su motor sin escobillas

10 veces la vida útil de un motor con escobillas  
Corte estable asegurado incluso en la parte estrecha y curva del conducto apical.  
Reduce el riesgo de separación del instrumento y mejora la eficiencia en la preparación del conducto apical.



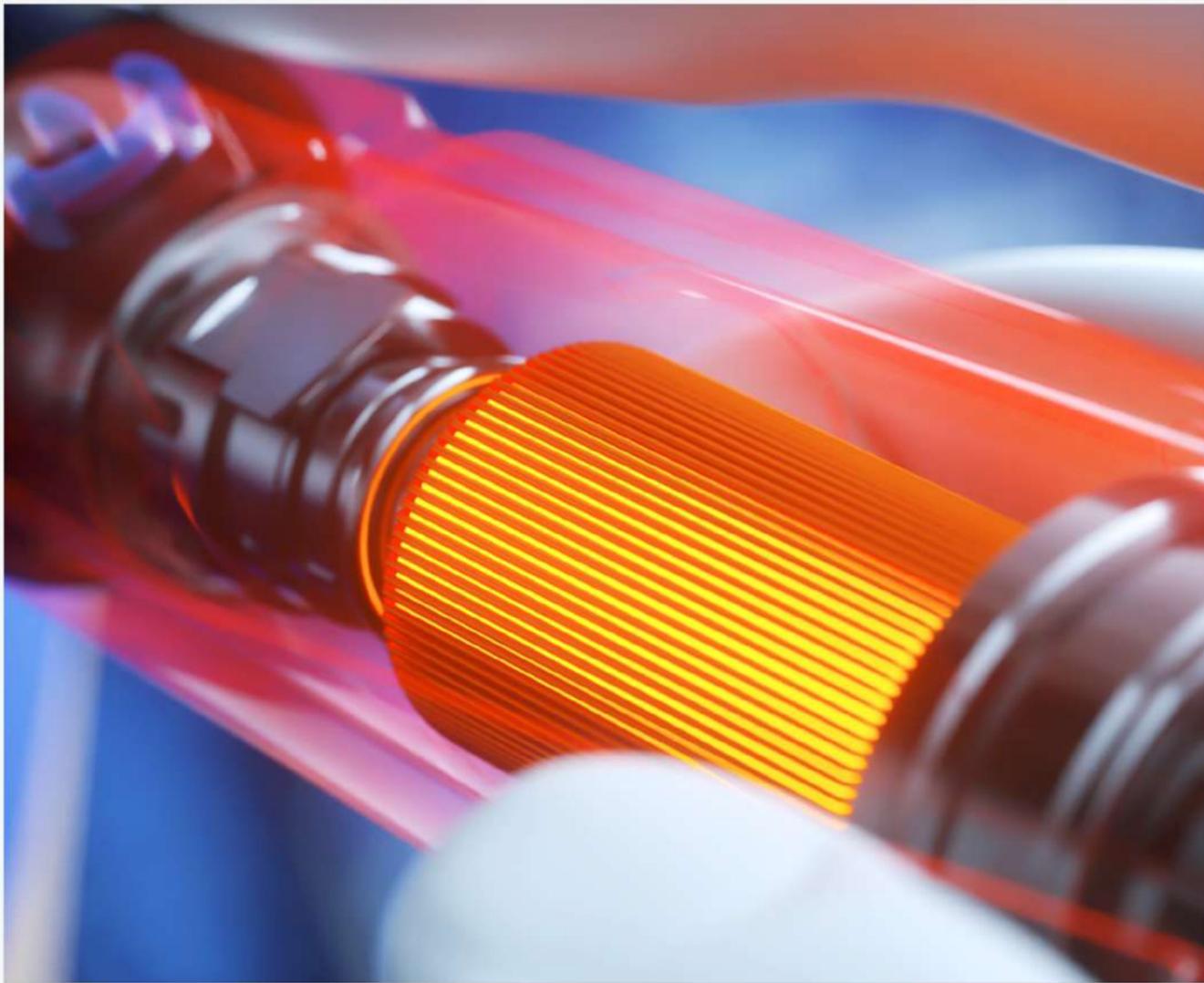

## Estable

### Alto desempeño de su motor sin escobillas

10 veces la vida útil de un motor con escobillas

Corte estable asegurado incluso en la parte estrecha y curva del conducto apical.

Reduce el riesgo de separación del instrumento y mejora la eficiencia en la preparación del conducto apical.



### Lava orange




Combination of excellent structure and fabulous proportion



### Snow white

Perfect blend of elegance and performance

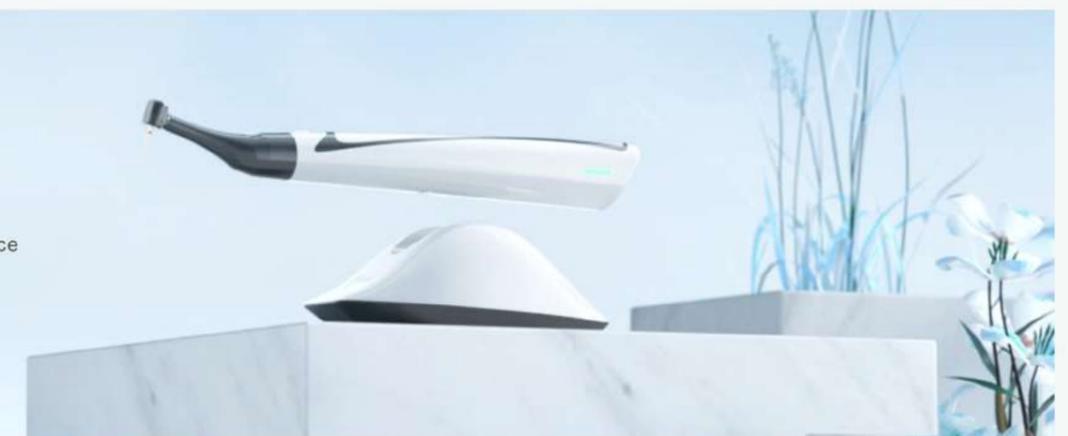

Más info



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.  
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech  
Zone, Guilin Guangxi, 541004 P. R. China

**Importador mayorista Woodpecker / DTE  
para España y Portugal**

**RUMAR Cedeira S.L.**

C. del Obispo Golfín, 11, Bajo A, 28430 Alpedrete, Madrid  
Tlfno.: 91 849 01 04  
Tlfmo. móvil / Whatsapp: +34 626 327 863

**¡Siempre en Stock! Entrega en 24 horas.**  
**Dispositivos, accesorios, repuestos y servicio postventa**

**RUMAR**  
mayorista dental

Su distribuidor de confianza: