



Manual de instalación Software **DM Nexus**



“Más control, mejores resultados”

1. Ejecutar el instalador



1.1 Primero, escanea el código QR proporcionado (también incluido en el suministro del escáner) para acceder a la descarga, en Software (Parte superior derecha de la web) o accede al siguiente enlace:

<https://dm-service.kevinpetertech.com/#/download>

1.2 A continuación, descarga la carpeta en formato **“.zip”** y espera a que finalice la descarga. Una vez completada, extrae el contenido del archivo **“.zip”** en una ubicación de tu equipo.


1.3 Abra la carpeta donde se encuentra el archivo de instalación **“DM Nexus-V1.0.4-setup”** y haga doble clic sobre él para iniciar el proceso.

 DM Nexus-V1.0.4-setup	31/03/2026 10:40	Aplicación
 DM Nexus-V1.0.4-setup-2.bin	31/03/2026 10:40	Archivo BIN
 DM Nexus-V1.0.4-setup-1.bin	31/03/2026 10:40	Archivo BIN

2. Seleccionar idioma inicial

Aparecerá una ventana para elegir el idioma (Inglés o Chino). Deje seleccionado **“English”** y pulse **“OK”**.

No se preocupe, más adelante podrá cambiar el idioma a otros disponibles, **incluido español**.

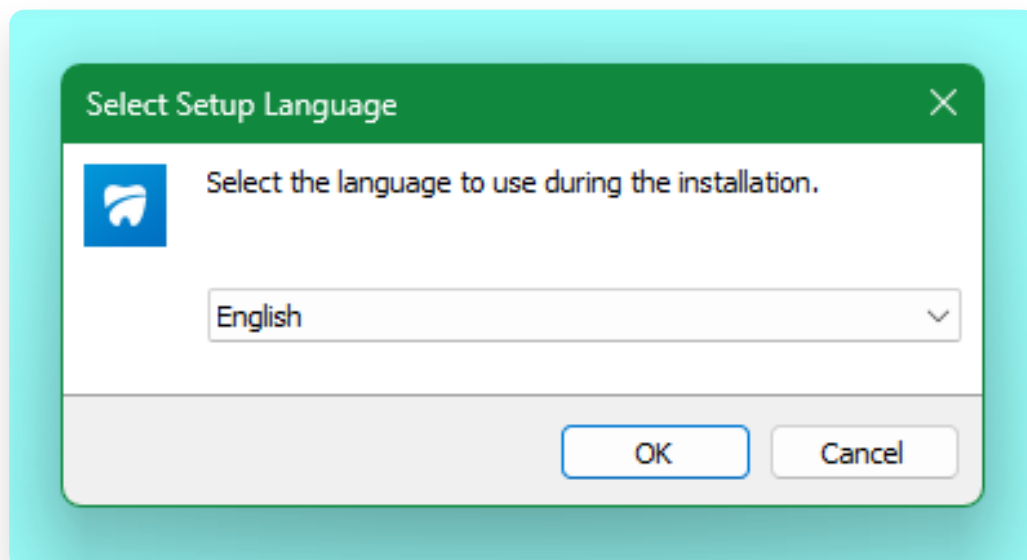


Si durante la instalación se solicita seleccionar la región geográfica, deberá elegirse la opción correspondiente a la ubicación del usuario (por ejemplo, Europa, Asia o África).

3. Aceptar el acuerdo de licencia

Lea los términos del acuerdo de licencia.

Seleccione la opción **“I accept the agreement”** y luego haga clic en **“Next”**.

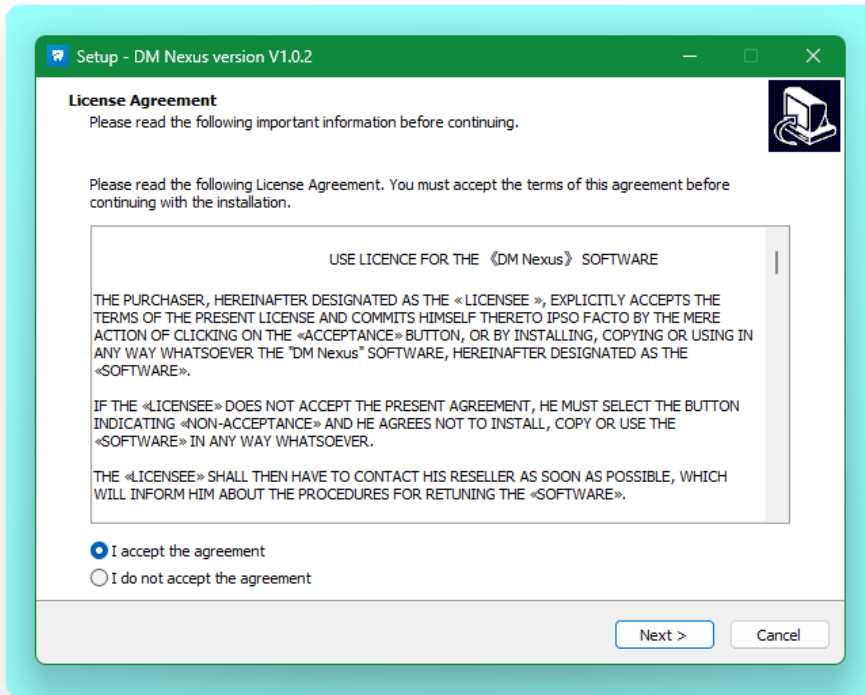


4. Crear acceso directo (opcional)

Se mostrará una ventana para elegir si desea crear un acceso directo en el escritorio.

Si desea el acceso directo, deje la casilla seleccionada.


Si no lo desea, desmarque la casilla.

Después, haga clic en **“Next”**.

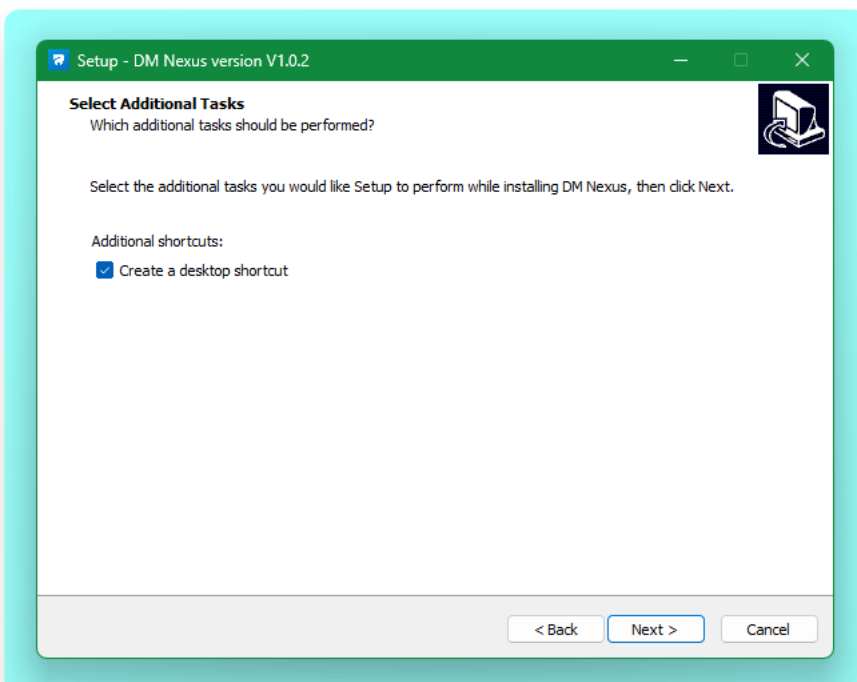


5. Iniciar la instalación

Haga clic en **“Install”** para comenzar la instalación.

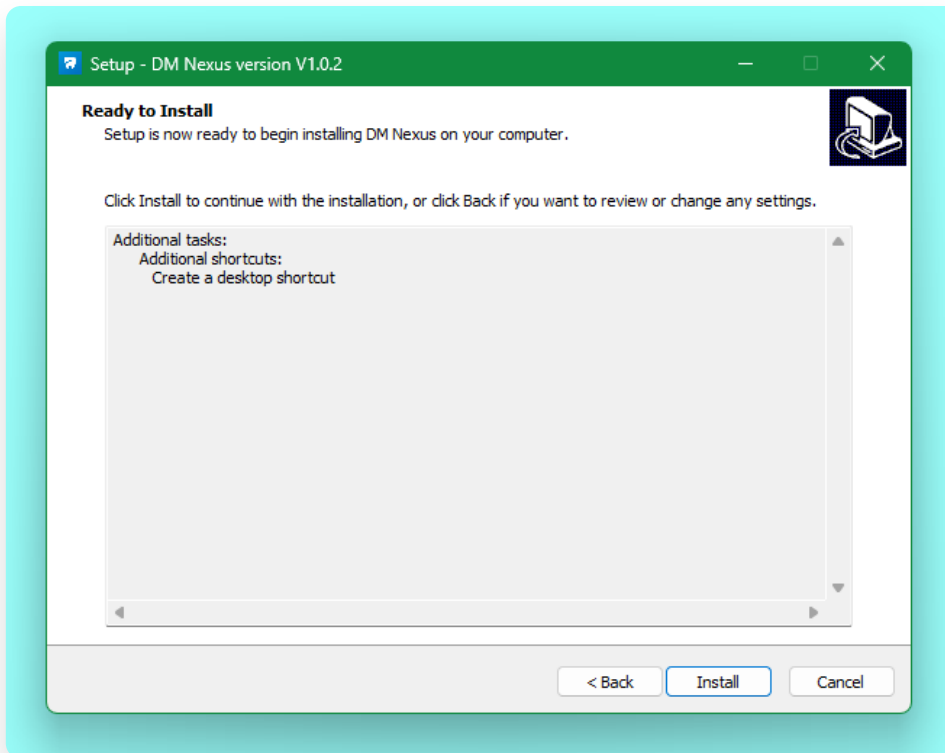


6. Esperar la instalación

Espere mientras el programa se instala completamente en el equipo. Este proceso puede tardar unos minutos.

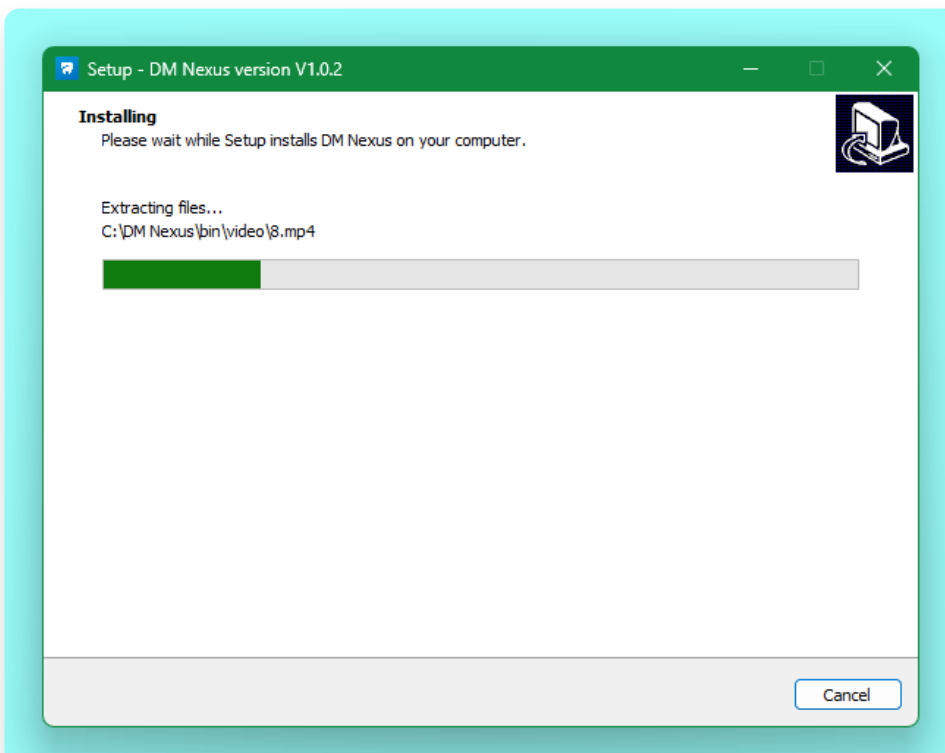

7. Finalizar instalación

Una vez que la instalación haya terminado, haga clic en **“Finish”**.

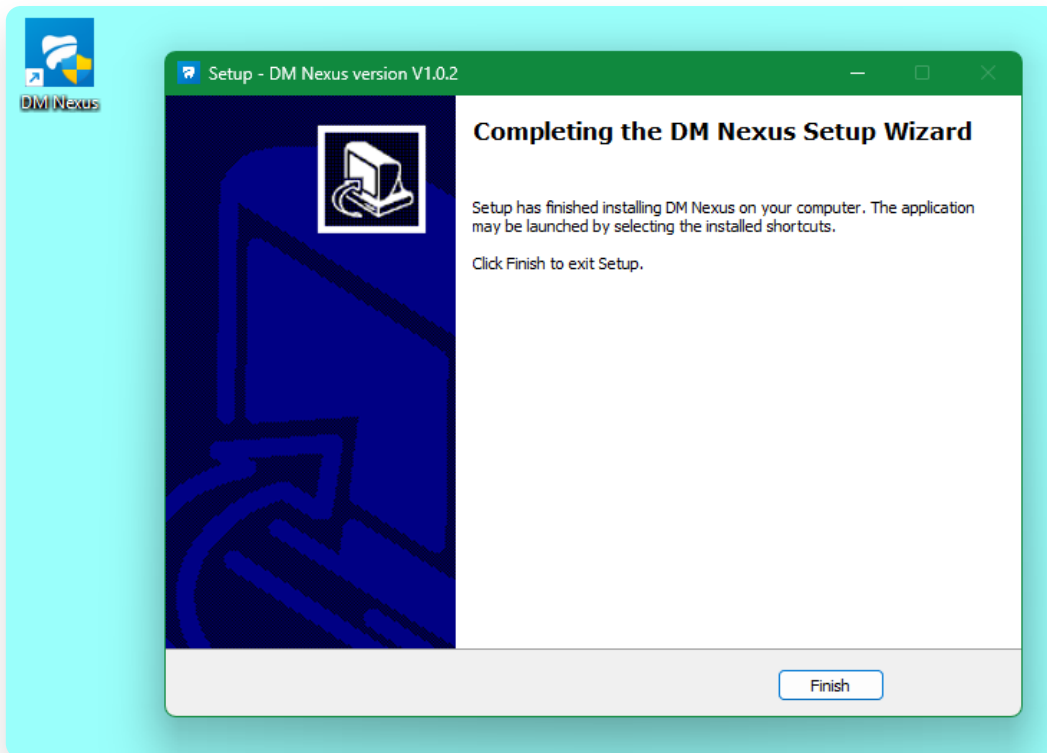


8. Abrir la aplicación y configurar idioma

Abra la aplicación.

En la parte superior de la ventana podrá cambiar el idioma si lo desea.

Si no dispone de una cuenta de usuario, haga clic en **“Registrar”** para crear una.

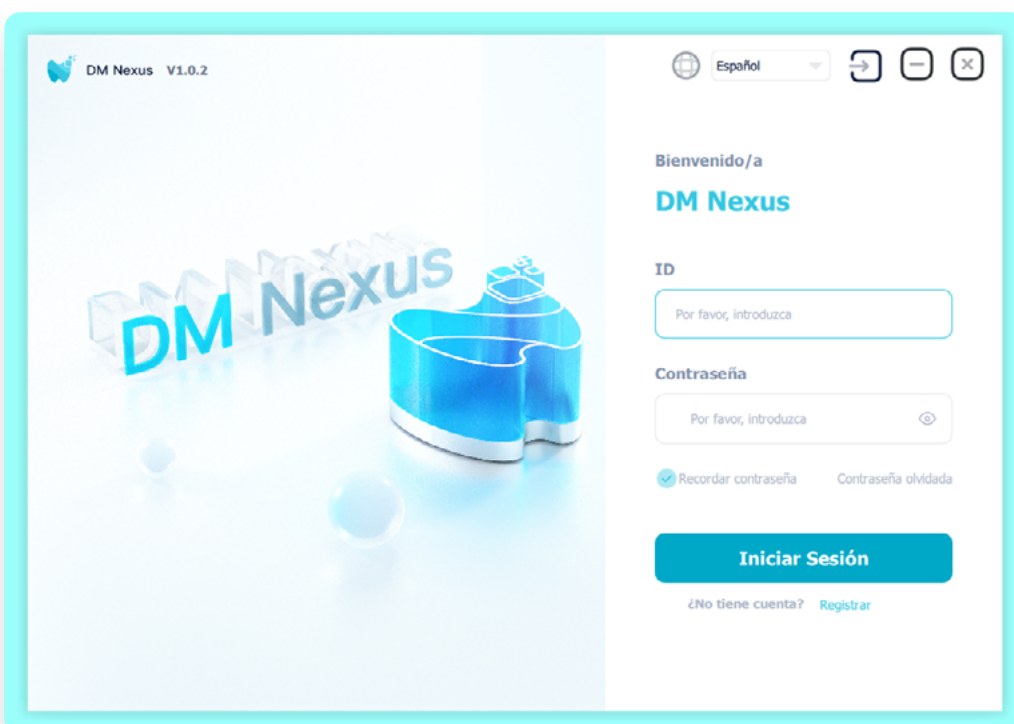

9. Crear cuenta en la página web

El sistema le dirigirá a la página web del programa, donde deberá elegir el tipo de cuenta que desea crear:

- **Administrador de clínica**
- **Miembro de clínica**
- **Administrador de laboratorio**
- **Miembro de laboratorio**

Seleccione la opción que corresponda y complete el registro.

Bienvenido/a a usar
Español

DM Nexus Plataforma en la nube

Por favor, selecciona su tipo de cuenta

Clínica


Administrador de la clínica
Con todas las funciones del software

- ✓ Gestión de pedidos
- ✓ Gestión de miembros de la organización
- ✓ Gestión de socios

Registrarse


Miembro de la clínica
Necesita estar vinculado a la clínica, ser miembro de la clínica y tener las funciones básicas del software

- ✓ Escaneo intraoral
- ✓ Ver orden

Registrarse

Laboratorio


Administrador del laboratorio
Con todas las funciones del software

- ✓ Gestión de pedidos
- ✓ Gestión de miembros de la organización
- ✓ Gestión de socios

Registrarse


Miembro del laboratorio
Necesita estar vinculado al instituto técnico, ser miembro del instituto técnico y tener las funciones básicas del software

- ✓ Ver orden
- ✓ Descargar archivo del modelo

Registrarse

Ya tiene una cuenta? [Volver a iniciar sesión](#)

6



10. Iniciar sesión

Una vez creada la cuenta, vuelva a la aplicación e inicie sesión con sus credenciales.

11. Instalación completada

La aplicación ya está lista para utilizarse.