



Manual de uso básico

Software **DM Nexus**




“Más control, mejores resultados”

1. Acceso al software

1.1 Abrimos el software **DM Nexus**.

1.2 Al iniciar, nos encontraremos con el **menú principal**, donde se muestran:

- **Lista de casos**
- **Lista de pacientes**
- **Lista de plug-ins**

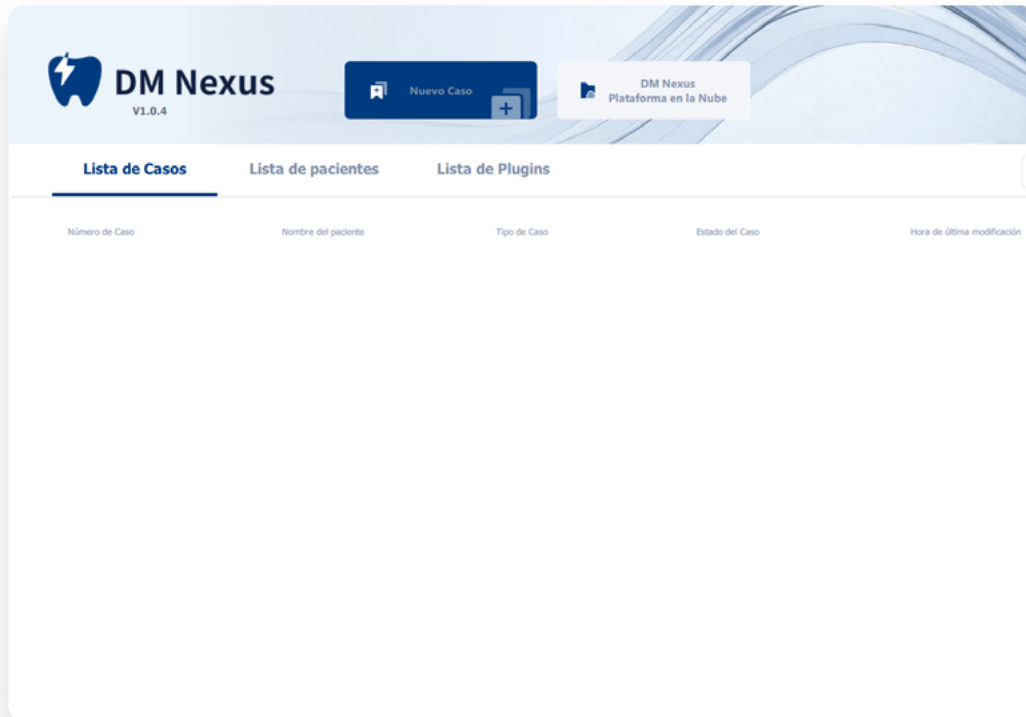

2. Creación de un nuevo caso

2.1 En la parte superior del menú principal (barra azul), hacemos clic en la opción **“Nuevo caso”**.



2.2 Se abrirá una ventana donde debemos introducir:

- **Datos del cliente**
- **Datos del caso**


Importante:

- **El único dato obligatorio para poder realizar el escaneo es el nombre del paciente.**
- Toda la información introducida aparecerá posteriormente en el informe final.

3. Inicio del escaneo

3.1 En la parte superior derecha, hacemos clic en el botón **“Escanear”**.

3.2 Se abrirá la ventana de escaneo.

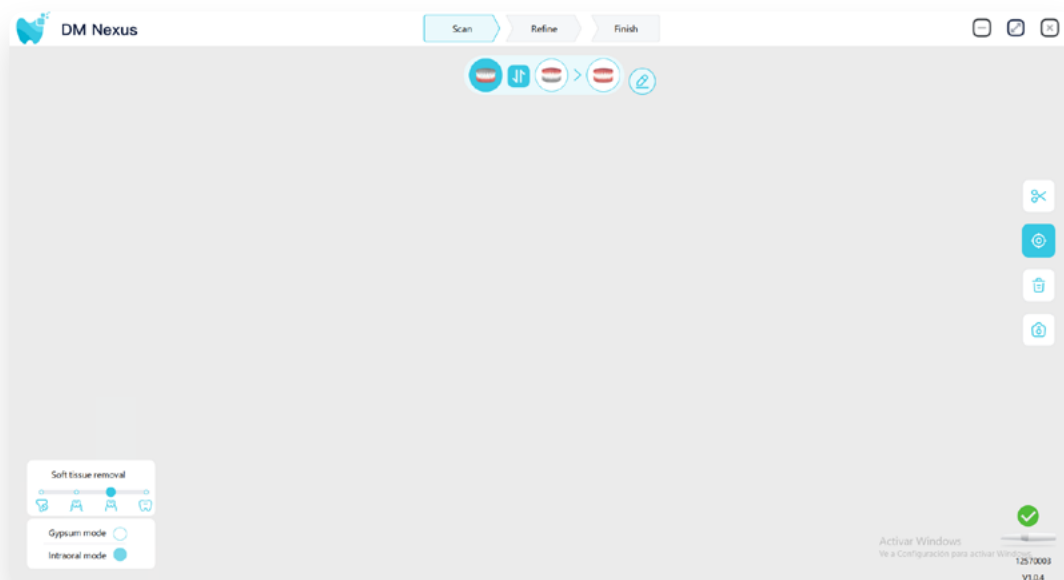


3.3 Podemos elegir el nivel de identificación de tejido blando, y si escanear en modo yeso (**Gypsum mode**) o modo intraoral (**Intraoral mode**).


3.2 Orden del escaneo

El proceso debe realizarse en el siguiente orden:


1- Mandíbula

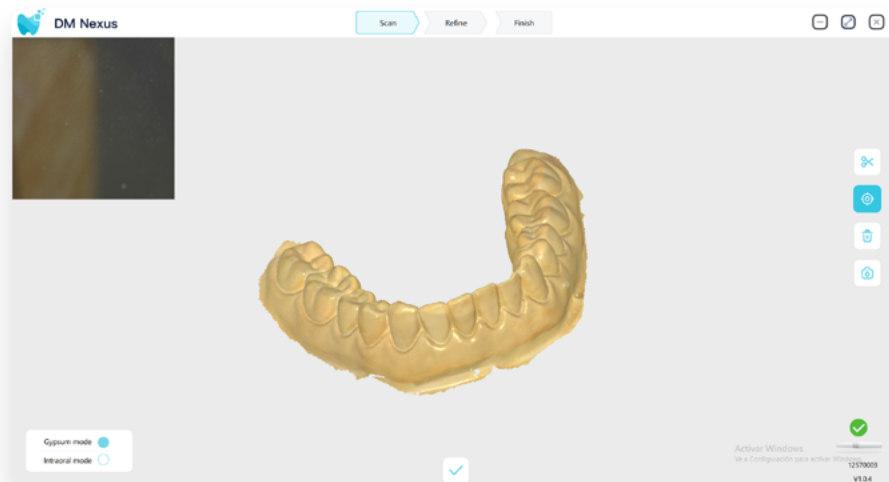

2- Maxilar

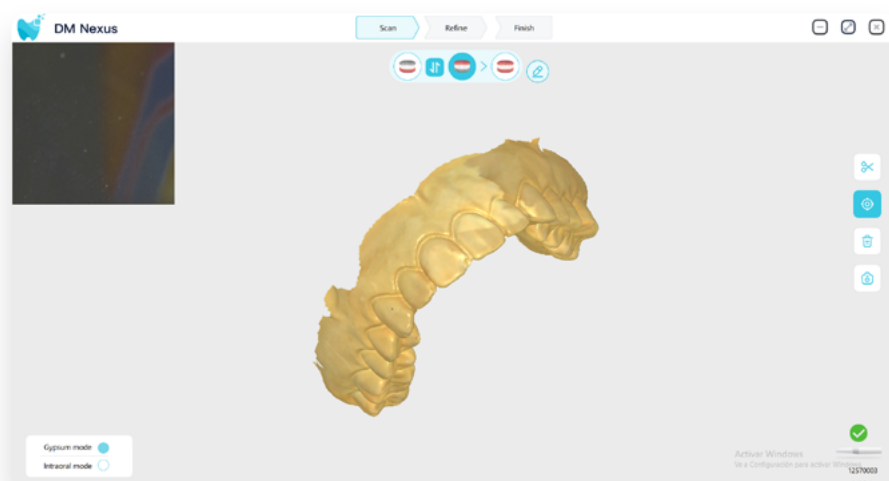

3- Mordida (para encajar ambas arcadas)

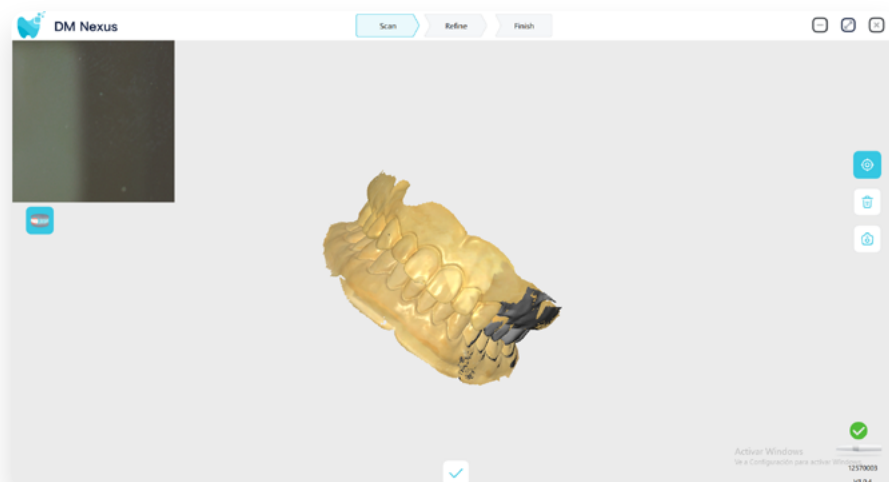


4. Herramientas durante el escaneo

Durante el proceso, el software ofrece varias opciones:

- **Borrador (goma):** Permite eliminar zonas escaneadas si no estamos satisfechos con el resultado.
- **Movimiento del modelo:** El modelo puede manipularse directamente con el escáner mediante un sistema tipo giroscopio.
- **Cámara intraoral:** Permite tomar fotografías de zonas de interés.
Estas imágenes se incluirán en el **informe final**, junto con los datos del caso y los escaneos.

5. Refinar escaneo

Una vez terminado el escaneo, hacemos clic en el botón de Refine y el sistema refinará el modelo final. Desde esta vista se puede visualizar la oclusión y utilizar la herramienta de medición.

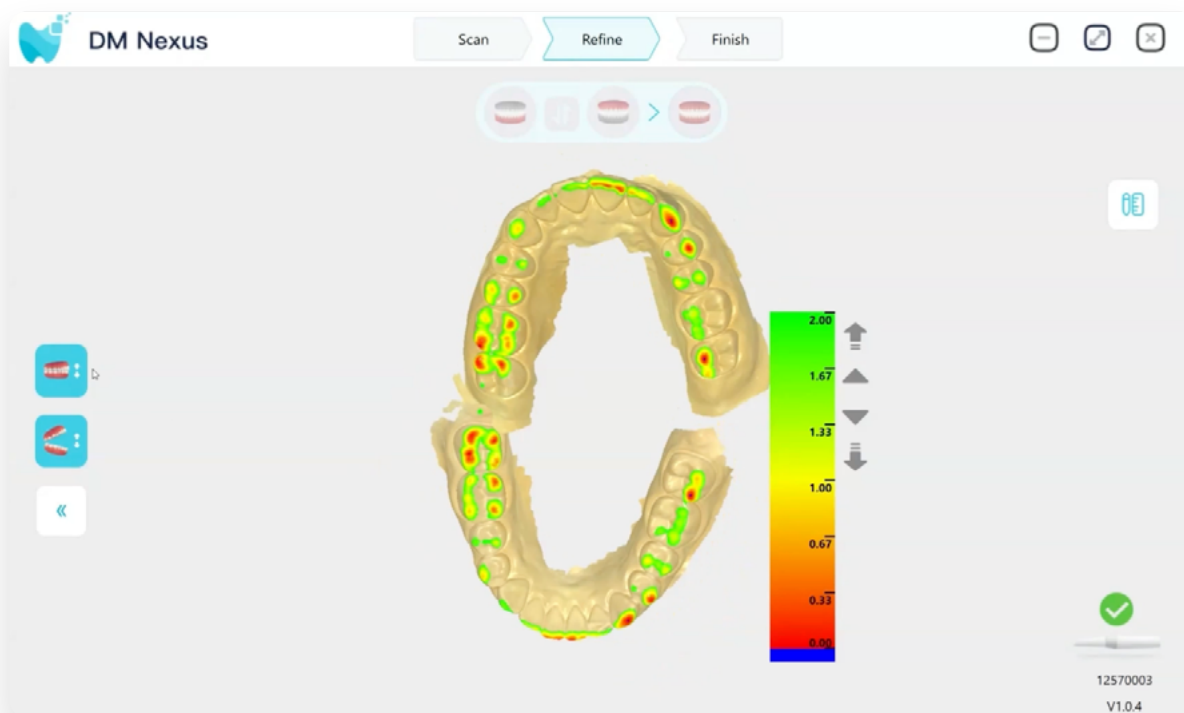


6. Finalización y vista previa

Hacemos clic en Finish y el sistema nos lleva a la pantalla de vista previa.

Aquí podremos revisar todo el contenido escaneado y aparecerán las fotografías tomadas con el modo de cámara intraoral (si las hacemos).

Además, desde esta pantalla se puede cambiar entre las diferentes vistas del modelo escaneado, modificar el color del modelo y visualizar Margin Line.

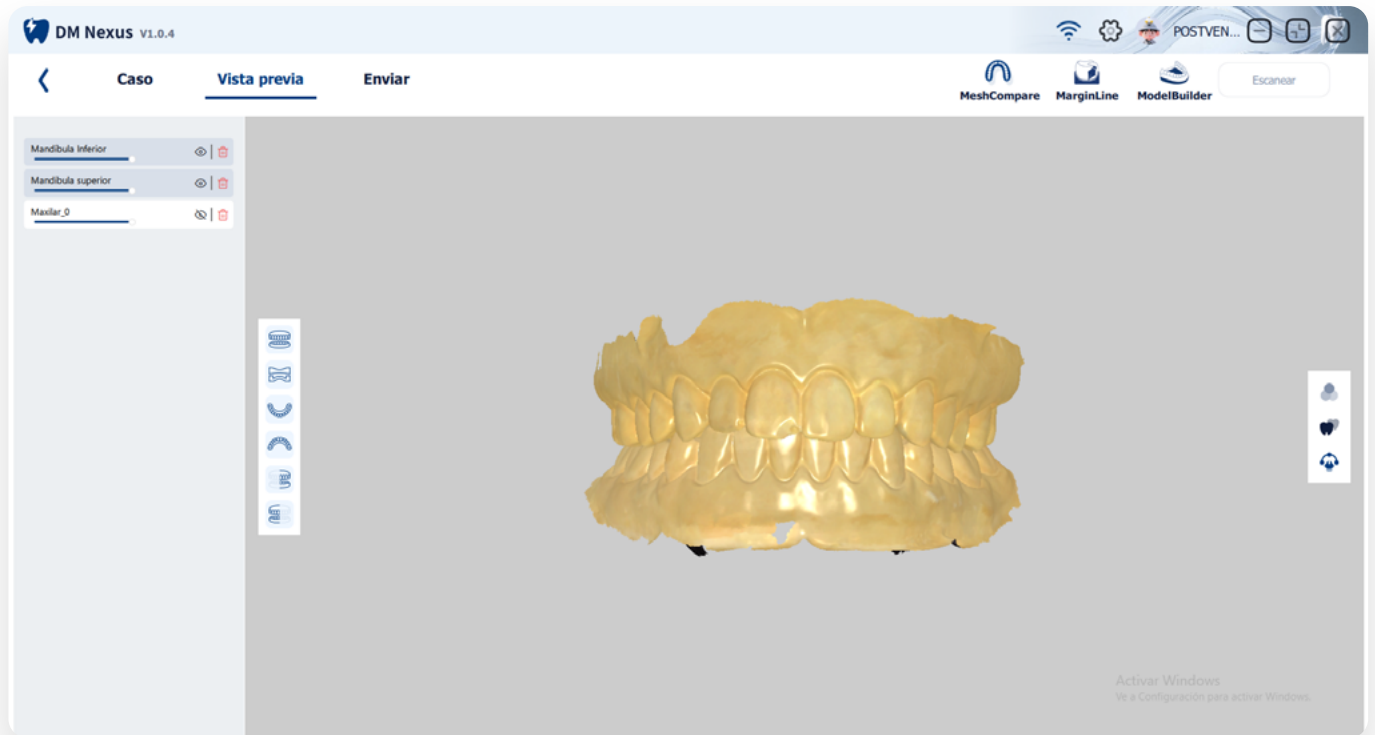

7. Uso de plug-ins (opcional)

Desde la pantalla de vista previa, podemos utilizar herramientas* adicionales como:



MeshCompare



MarginLine



ModelBuilder


** El uso de estos plug-ins es completamente opcional.*

8. Guardado y envío del caso

Desde esta misma ventana, podemos:

- **Guardar el caso** (Se añadirá a nuestra lista de casos y es un proceso automático, no se necesita realizar alguna acción para guardar el caso)
- **Enviar el caso:**
 - A la nube
 - Directamente al **laboratorio** (si dispone de perfil configurado)

Los escaneos pueden enviarse en el formato de archivo que prefiramos.

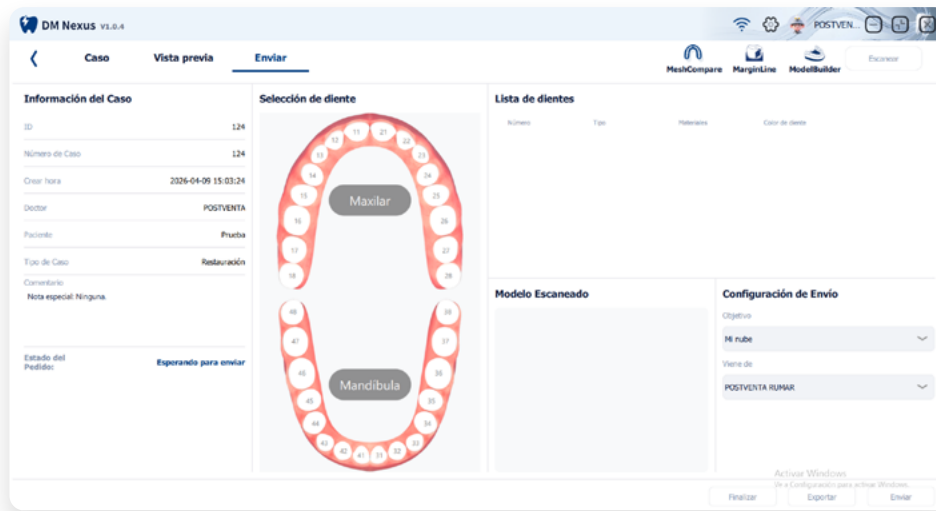

9. Finalización

Una vez enviado o guardado el caso, el proceso queda completado.