


Fi-G&Fi-P

Sistema de inyección y obturación
de gutta-percha

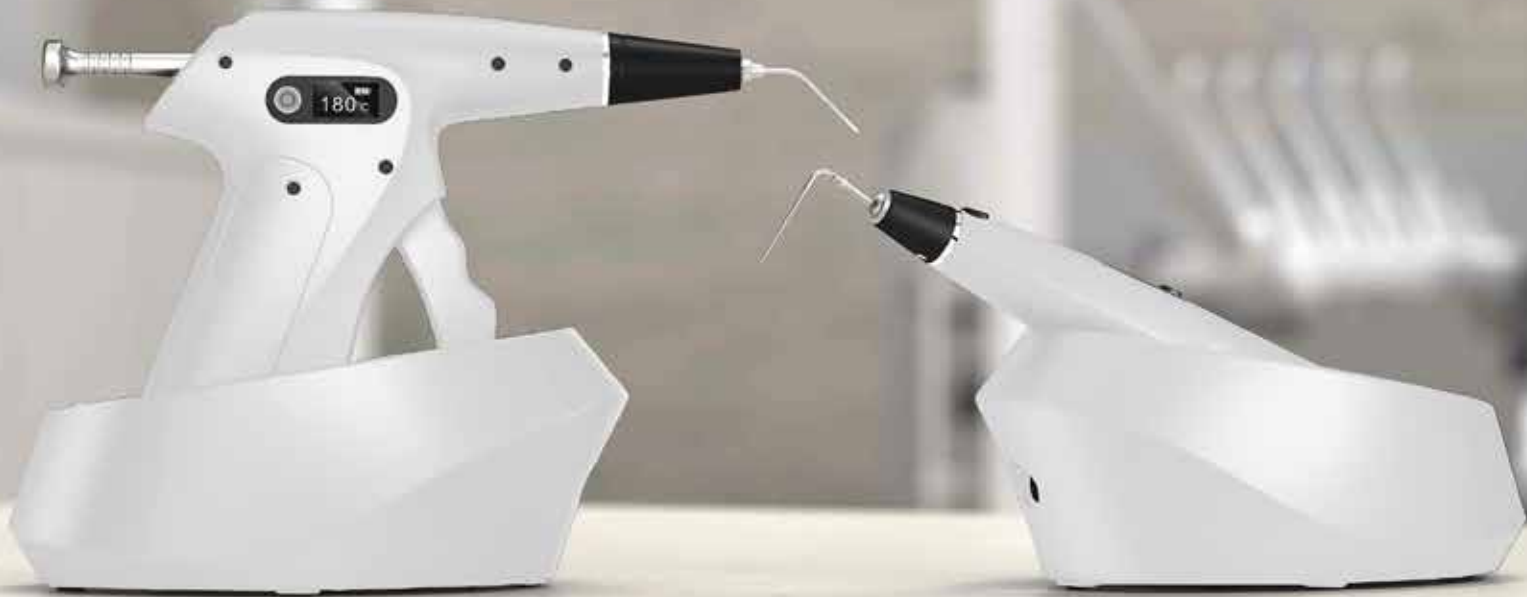

Fi-G

0.5 mm injection needle

Prevent gutta-percha leakage
360° degree rotatable injection needle

15-second fast heating

Pushing ram with anti-return structure

Fi-P

0.2-second fast heating

0.4 mm bendable tip



Fi-G



Tiempo de calentamiento de **15 s**

Reduce los tiempos de espera y aumenta tu eficiencia en el trabajo.



Evita las fugas de gutapercha
Aguja giratoria de 360°

Estructura optimizada, rotación uniforme de 360°, lo que evita eficazmente las fugas de gutapercha.



Aguja de inyección de **0,5 mm**

Fácil acceso a los 3 mm apicales del conducto para un mejor empaste



3 mm



Émbolo de empuje
con estructura antirretorno

Estructura de bloqueo mecánico que impide eficazmente que el pistón de empuje retroceda y evita la formación de cavidades y burbujas.



Tipo	Tamaño	Longitud
20G 22 mm	20G	22 mm
20G 24 mm	20G	24 mm
20G 28 mm	20G	28 mm
23G 24 mm	23G	24 mm
23G 28 mm	23G	28 mm
25G 24 mm	25G	24 mm

Fi-P



Tiempo de calentamiento de **0,2 segundos**

El sistema de conversión de alto rendimiento garantiza un corte eficiente.




Punta flexible de **0,4 mm**

Las puntas más finas pueden penetrar profundamente en el estrecho conducto radicular, lo que te proporciona un mejor resultado del tratamiento.



Control de temperatura de **alta precisión**

Constant temperature prevents scalding.

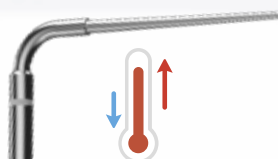

7 temperaturas de funcionamiento

90°C, 120°C, 150°C, 180°C, 200°C, 230°C, 250°C

Suitable for different brands of gutta-percha on the market.



4 horas de autonomía


La batería de gran capacidad y el sistema de calefacción especial permiten realizar 1.500 operaciones con una carga completa.



Tipo	Diámetro	Conicidad
WP4004	0.40 mm	0.04
WP4504	0.45 mm	0.04
WP5004	0.50 mm	0.04
WP5506	0.55 mm	0.06
WP5508	0.55 mm	0.08
WP5510	0.55 mm	0.10
WP6012	0.60 mm	0.12
WP5508L	0.55 mm	0.08
WP7006	0.7 mm	0.06
WP8006	0.8 mm	0.06
WP9006	0.9 mm	0.06
40A90	0.4 mm	0.06



- 01** Selecciona un cono de gutapercha maestro adecuado en función del conducto radicular preparado.

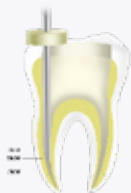


- 02** Selecciona una punta adecuada para el Obturation Pen. Introduce la punta en el conducto radicular y mantenla a una distancia de entre 3 y 5 mm del foramen apical. Utiliza un tapón de goma para marcar la longitud de trabajo. Mientras tanto, selecciona un tapón del mismo tamaño.




- 03** Aplica sellador al cono maestro e insértalo en el conducto radicular.



- 04** Introduce la punta del Obturation Pen en el conducto radicular. Pulsa el botón de calentamiento para cortar el exceso de gutapercha y retíralo.

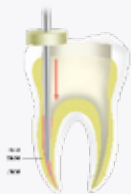

- 05** Introduce la punta en el conducto radicular y pulsa el botón de calentamiento. Haz avanzar la punta para ablandar la gutapercha hasta que llegue a un punto situado a una distancia de entre 3 y 5 mm del foramen apical.

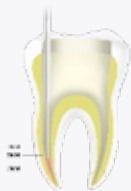

09

Coloca la aguja del Fi-G sobre la superficie de la gutapercha en el conducto radicular y mantenla allí durante unos 3 s para ablandar la gutapercha.



10

Injecte gutapercha calentada en el conducto radicular mientras retira gradualmente la aguja. No rellene el conducto radicular por completo de una sola inyección. Se recomienda realizar el relleno en tres etapas, y cada inyección no debe superar los 4 mm.



11

Utiliza un compactador para compactar la gutapercha inyectada en el conducto radicular.



12

Repite los pasos 9 a 11 hasta que el conducto radicular esté completamente relleno.

Procedimiento de obturación con gutapercha caliente




Fi-P (calentamiento y compactación)



Fi-G (inyección)



Plugger

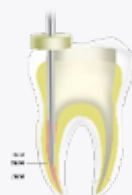

06

Suelta el botón de calentamiento para detener el calentamiento, sin dejar de ejercer presión sobre la gutapercha del conducto con la punta durante unos 10 segundos.



07

Pulsa el botón de calentamiento durante aproximadamente 1 s y, a continuación, retira rápidamente la gutapercha restante a una distancia de entre 3 y 5 mm del foramen apical.



08

Utiliza un tapón para compactar la gutapercha en el conducto radicular.





23G 24 mm
x1



23G 28 mm
x1



25G 24 mm
x2



20G 22 mm



20G 24 mm



20G 28 mm

Configuración estándar

Opcional



WP4004
Atacador #40/04
x1



WP4504
Atacador #45/04
x1



WP5506
Atacador #55/06
x1



WP5508
Atacador #55/08
x1



WP7006
Atacador #70/06
x1

Configuración estándar



WP5004
Atacador #50/04



WP5508L
Atacador #55/08



WP5510
Atacador #55/10



WP6012
Atacador #60/12



WP8006
Atacador #80/06



WP9006
Atacador #90/06



40A90
Atacador #40/06

Opcional



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin Guangxi, 541004 P. R. China



**Importador mayorista Woodpecker / DTE
para España y Portugal**

RUMAR Cedeira S.L.

C. del Obispo Golfín, 11, Bajo A, 28430 Alpedrete, Madrid
Tlfno.: 91 849 01 04
Tlfmo. móvil / Whatsapp: +34 626 327 863

¡Siempre en Stock! Entrega en 24 horas.

Dispositivos, accesorios, repuestos y servicio postventa

Su distribuidor de confianza: